

取扱説明書

首かけ集音器



はじめに、聞こえかたの調整をしましょう
本書の「準備する」をご覧ください

周囲の音を聞く



本製品は、周囲の音や会話を聞き取りやすくするための「集音器」です。イヤホンに内蔵されたマイクで周囲の音を増幅します。

テレビの音を聞く



充電台をテレビに接続すると、テレビの音声を集音器のスピーカーまたはイヤホンから聞くことができます。充電台から集音器にテレビの音声を無線で送信します。

4-698-970-02(1)
© 2017 Sony Corporation Printed in China



中身を確認する

- 集音器(1)
- 電源用ケーブル(USB)(1)
- 光デジタルケーブル(1)
- 充電台(1)
- 音声ケーブル(1)
- キャリングポーチ(1)
- ACアダプター(1)
- イヤークラス
- イヤークラス
- 取扱説明書(本書)(1)
- 使用上のご注意/主な仕様(1)
- 本機のソフトウェアについて(1)
- 保証書(1)
- 「製品登録」のおすすめ(1)


お買い上げ時には、Mサイズのイヤークラスがイヤホンに装着されています

イヤークラスの交換について詳しくは、裏面右側「イヤークラスを交換する」をご確認ください


準備する

1 充電する

1 充電台をコンセントにつなぐ

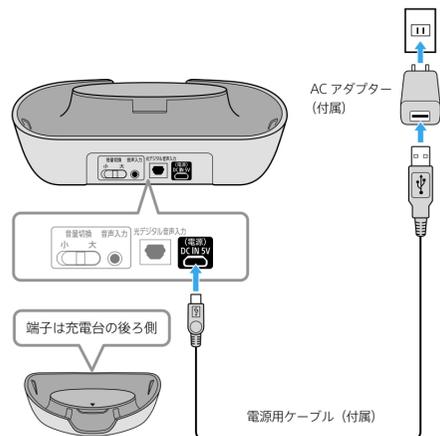

2 集音器を充電台に置いて充電する

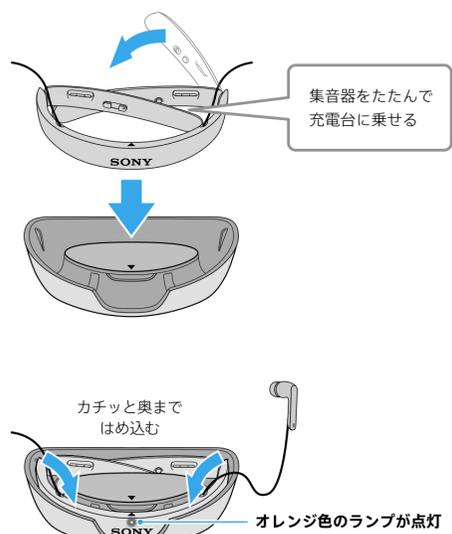

オレンジ色のランプが緑色に変わったら充電完了です
使用するときには集音器を充電台から取り出します


約3時間で充電できます

充電は自動で停止するため、充電台に置いたままでも電池の劣化に影響ありません。


- 内蔵充電式電池の持続時間
- 集音(イヤホンで聞く) 約24時間
 - テレビ(イヤホンで聞く) 約15時間
 - テレビ(スピーカーで聞く) 約10時間

2 設定の準備をする


1 集音器の電源を入れる

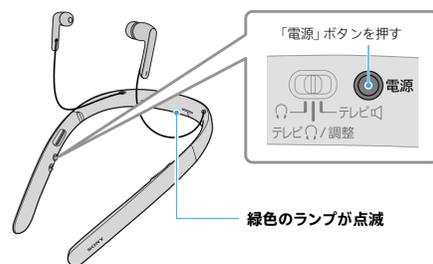

2 集音器を「テレビ/調整」に切り換える

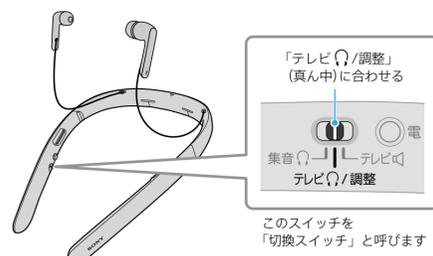

3 左右の向きに気を付けて集音器を首にかけ、イヤホンを耳に入れる

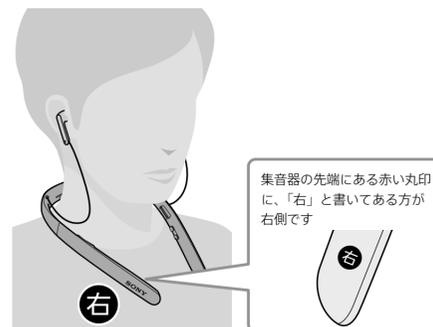

イヤホンが耳に合わないと感じるときはイヤークラスを交換してください
詳しくは裏面右側「イヤークラスを交換する」をご確認ください


次に、聞こえかたを調整しましょう!

音声案内に従った、簡単な操作をするだけで調整できます。
「3 聞こえかたを調整する」をご確認ください。

3 聞こえかたを調整する

1 充電台のふたを開けて、「調整」ボタンを押す


この作業は静かな場所で実施してください
(聞こえかたの調整には10分程度かかります。調整にはさらに時間がかかる場合もあります)

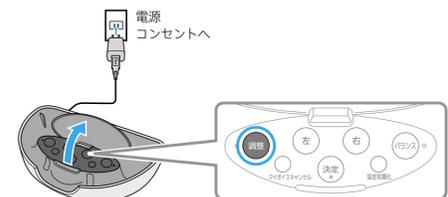

調整をはじめます。音声案内に従って操作してください。




音声案内が流れるので「決定」ボタンを押します

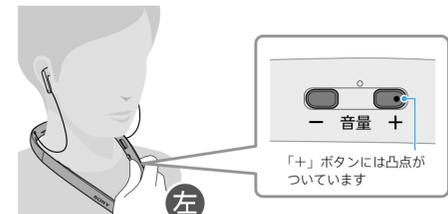


2 音声案内に従って調整する

ピーという音が聞こえるたびに、「決定」ボタンを押してください。
聞こえないときは、音が聞こえるまでお待ちください。

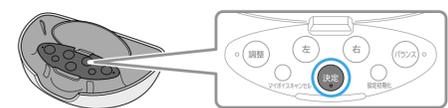

左耳の音を大きくするには左のボタン、右耳の音を大きくするには右のボタンを押してください。

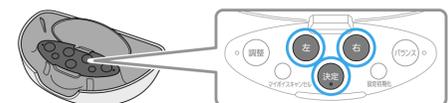

3 自動調整に必要な音楽が流れるので、終わるまで聞く

以上で、調整が終わりました。おつかれさまでした!


集音器が左右の聞こえかたに合わせて調整されました。
調整をやり直したいときはもう一度「調整」ボタンを押してください。

さっそく、使ってみましょう!


周囲の音を聞く

相手の声を聞き取りやすくする「集音器」

1 集音器の電源を入れる

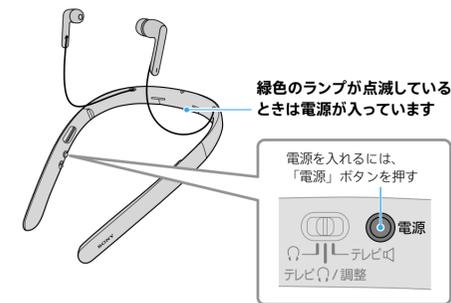

2 集音器を「集音器」に切り換えてイヤホンを耳に入れる

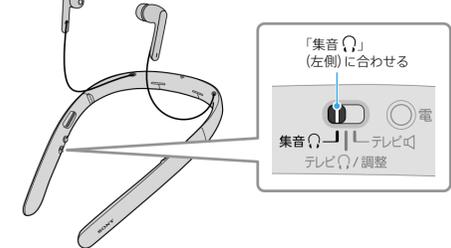


3 音量「-/+」ボタンを押して音量を調整する

「+」ボタンを押すと音が大きく、「-」ボタンを押すと音が小さくなります



電源を切るには


もういちど「電源」ボタンを押すと電源が切れます

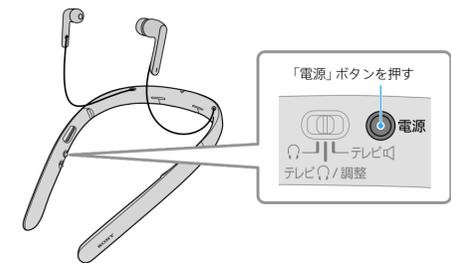


テレビの音を聞く

1 充電台を設置する

1 充電台とコンセントをつなぐ

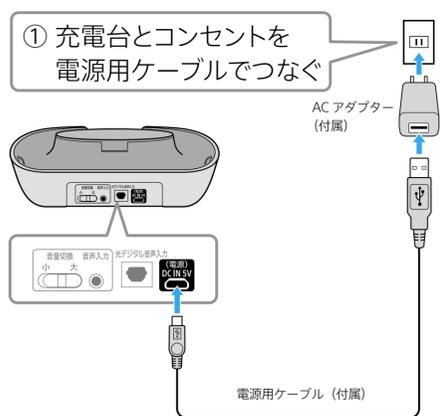

2 充電台とテレビをつなぐ

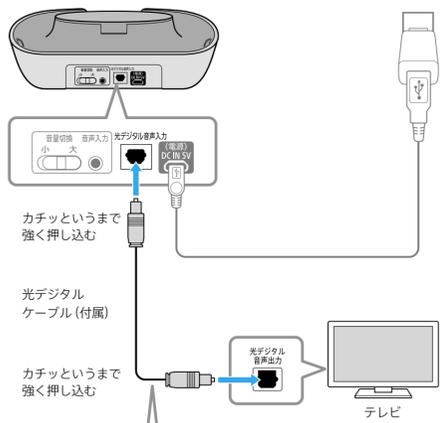

② 充電台とテレビを光デジタルケーブルでつなぐ

光デジタル音声出力端子はテレビの側面や裏側にあることがあります。詳しくは、テレビの取扱説明書をご確認ください。


テレビの光デジタル音声出力設定を「PCM」にしてください。詳しくはテレビの取扱説明書をご確認ください。

設定方法の例

ソニー製テレビの場合：
「設定」-「音質・音声設定」-「デジタル音声出力設定」
または「光音声出力設定」を「PCM」にする


光デジタル音声出力端子が見つからないときは

お使いのテレビによっては、光デジタル音声出力端子がないことがあります。その場合は、付属の音声ケーブルでテレビと接続します。
「その他の接続のしかた：光デジタル音声出力端子が見つからないときは」（このページの中央）をご確認ください。

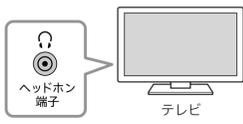


2 テレビの音を集音器のスピーカーで聞く「テレビ」

1 集音器の電源を入れる

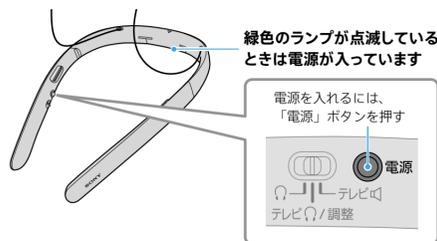


2 集音器を「テレビ」に切り換える

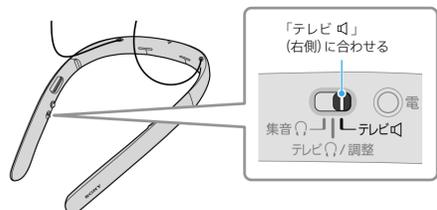


3 集音器を首にかけて、テレビの電源を入れる

イヤホンは耳に入れないで使えます
テレビの音声が集音器のスピーカーから聞こえます

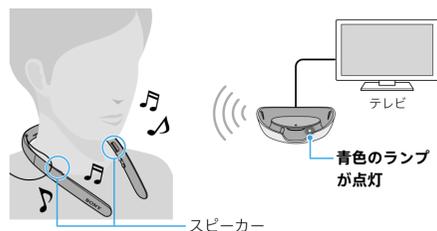


4 音量「-/+」ボタンを押して音量を調整する

「+」ボタンを押すと音が大きく、「-」ボタンを押すと音が小さくなります

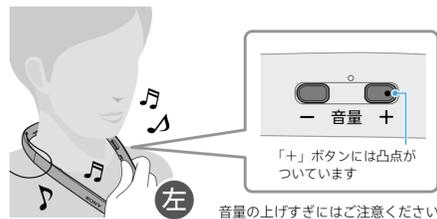

その他の使いかた：


イヤホンからテレビの音を聞きたいときは集音器を「テレビ」に切り換えます

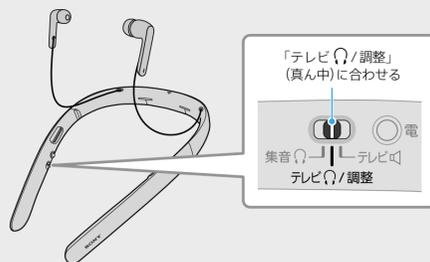

その他の接続のしかた：

光デジタル音声出力端子が見つからないときは

音声ケーブル (付属) で充電台とテレビをつなぎます
テレビのスピーカーからは音が出なくなります

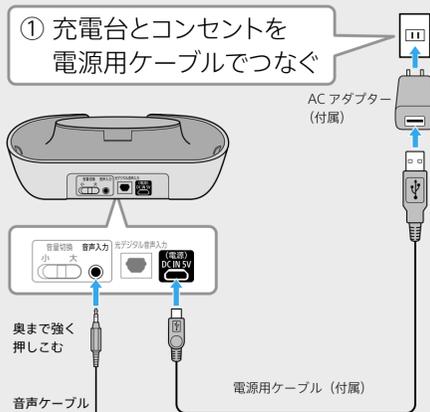

② 充電台とテレビを音声ケーブルでつなぐ

テレビによっては以下のように設定を変更することで、テレビのスピーカーからも音声が出るようになります。詳しくはテレビの取扱説明書をご確認ください。

設定方法の例

ソニー製テレビの場合：
「設定」-「音質・音声設定」に「ヘッドホン・音声外部出力設定」がある場合は、「ヘッドホン」に設定されていることを確認し、「ヘッドホン使用時設定」を「スピーカー・ヘッドホン併用」にする

困ったときは


電源を入れても音が出ない

- 周囲の音を聞くときは集音器を「集音」に、テレビの音を聞くときは「テレビ」または「テレビ / 調整」に切り換えてください。
- 電池が消耗しています。集音器を充電してください。



電話の音が聞こえない

- 電話の受話器をイヤホンのマイク穴に合わせて通話してください。受話器は耳の下側に当てるようにすると音が聞きやすくなります。

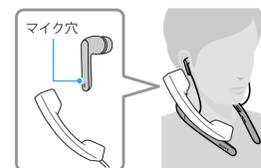

ピーピーと音がする(ハウリング)

- イヤホンを耳の奥までしっかりと差し込んで、すき間があかないようにしてください。
- イヤホンが耳に合わないときは、イヤピースのサイズを変更してください。

テレビの音が途切れる

- 近くに電子レンジやスマートフォンなどの無線機器があると電波が干渉することがあります。できるだけこれらの機器から離してご使用ください。


イヤピースを交換する

イヤホンが耳に合わないときはイヤピースを交換します
お買い上げ時にはMサイズのイヤピースが装着されています




付属のイヤピースのサイズが合わないときや、紛失・消耗したときは、別売のEP-EX11シリーズ(SS、S、M、L、LLの各サイズ)をお買い求めください

イヤピースをはずす

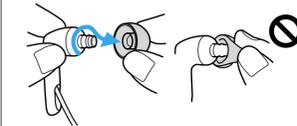

イヤピースの端をつまんで引っ張らないでください


イヤピースを取り付ける

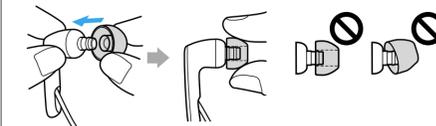

イヤピースを奥までしっかり押し込んでください
斜めに取り付けしないでください


イヤホンやイヤピースのお手入れについて

イヤホンの音が出る部分が汚れると故障の原因になります
ご使用後は必ずお手入れをしてください

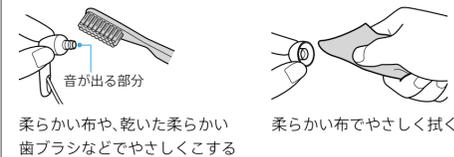

テレビの音が出ない (光デジタルケーブル使用時)


- 充電台とテレビ、充電台とコンセントが正しく接続されているかご確認ください。ケーブルは奥までしっかり差し込んでください。

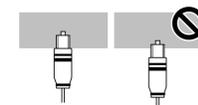

- テレビの光デジタル音声出力設定を「PCM」にしてください。詳しくはテレビの取扱説明書をご確認ください。

テレビの音が出ない/割れる (音声ケーブル使用時)


- テレビによっては、ヘッドホン端子につないだ機器の音量を独立して調整できないことがあります。その場合は、テレビのリモコンで音量を調整してください。

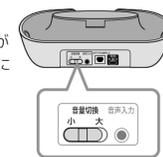

- 音声ケーブルをご使用の場合、音が割れることがあります。充電台の「音量切換」スイッチを「小」に切り換えると症状が改善することがあります。

それでも解決しないときは

- 集音器のリスタートボタン、先のとがったペンなどで押してください。
- 充電台のACアダプターをコンセントから外し、もう一度つなぎ直してください。

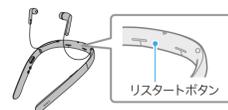

集音器の設定を変更する

左右の音量を同じにする(左右バランス調整)

左右の音量バランスを調整します

1 集音器を「テレビ」に切り換える

2 充電台のふたを開けて「バランス」ボタンを押す

音声案内に従って操作し、左右の音量バランスを調整します
左右バランスが初期値になると、ピピッと音が鳴ります

自分が話す声の音量を下げる (マイボイスキャンセリング)

自分が話しているときに、集音器の音量を自動で下げます
お買い上げ時には、「有効」に設定されています

1 集音器を「テレビ」に切り換える

2 充電台のふたを開けて「マイボイスキャンセル」ボタンを押す

ボタンを押すごとに「有効」「無効」を切り換えます