

HVO-550MD

DICOM DVD 書き出し機能

DICOM DVD 書き出し機能を使用するための準備

必要に応じて、DICOM 情報を設定します。

1 MENU ボタンを押す。


「メニュー」画面が表示されます。

2 ↑、↓ ボタンを押して [設定] を選び、ENTER ボタンを押す。




「設定」画面が表示されます。

3 ←、→ ボタンを押して [システム管理者設定] を選び、ENTER ボタンを押す。

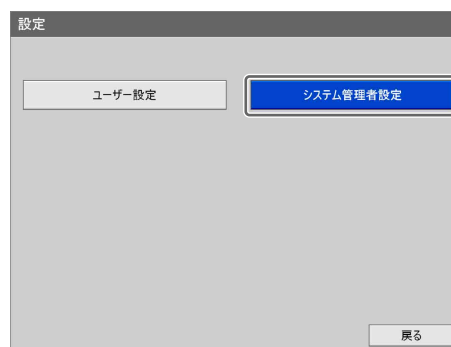

「システム管理者設定」画面が表示されます。

4 ↑、↓、←、→ ボタンを押して [DICOM 設定] を選び、ENTER ボタンを押す。

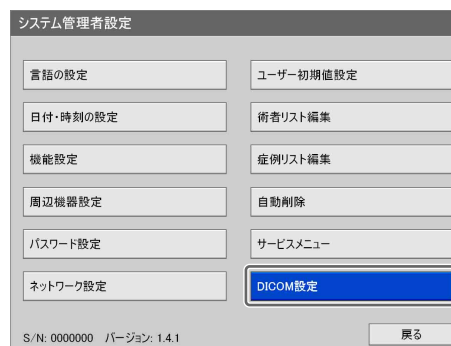

「DICOM 設定」画面が表示されます。

5 各項目を設定する。

DICOM設定

自局

ステーション名

施設名

施設住所

指定文字セット IR6

設定 戻る

ステーション名

ソフトキーボードを使って、ステーション名を入力します。

施設名

ソフトキーボードを使って、施設名を入力します。

施設住所

ソフトキーボードを使って、施設の住所を入力します。

指定文字セット

表示される「指定文字セット」画面で、使用する言語に応じた文字コードを選び、ENTER ボタンを押します。

指定文字セット

IR6 キャンセル

IR13

IR100

IR101

6 設定が終了したら、↑、↓、←、→ ボタンを押して「設定」を選び、ENTER ボタンを押す。

設定が保存され、「システム管理者設定」画面に戻ります。

DICOM DVD 書き出し機能を使用する

メモ

- 本機能をサポートするバージョンで記録した録画データを選んでください。
- DVD-R (1層) は、ソニー製の推奨ディスクをご用意ください。推奨ディスクは、お買い上げ店にお問い合わせください。
- 静止画のフォーマットは、ビットマップを選んでください。
- 患者名フィールドは運用前に設定し、その後変更しないでください。
- 患者名には、「^」(キャレット) を使用しないでください。
- 患者名に「\」(バックスラッシュ) を使用した場合は、「_」(アンダースコア) に変換されて、DVD に書き出されます。

1 本機のディスクトレイに未フォーマットの DVD-R (1層) を入れる。

2 MENU ボタンを押す。

「メニュー」画面が表示されます。

3 ↑、↓ ボタンを押して「録画一覧」を選び、ENTER ボタンを押す。

メニュー 2017/01/11 16:53:29

録画準備 入力 DVI-D

録画終了 DVD 残量 0時間45分

録画一覧 USB 1 残量 1時間7分


SERVER

設定 プリンター

録画一覧画面に移動します


「録画一覧」画面が表示されます。

- 4 ↑、↓、←、→ ボタンを押して操作のボックスを選び、ENTER ボタンを押す。

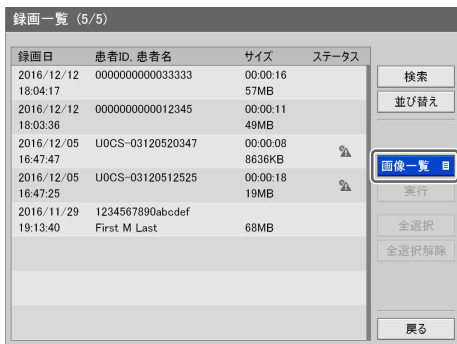

次の画面が表示されます。


- 5 ↑、↓ ボタンを押して [DICOM] を選び、ENTER ボタンを押す。

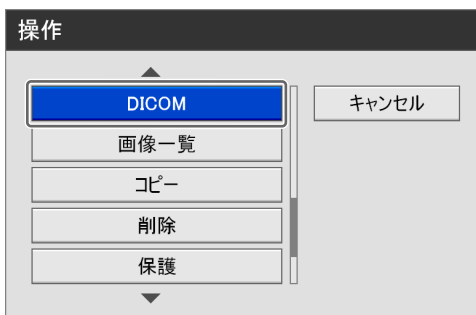

「録画一覧」画面に戻ります。


- 6 コピーしたい録画データにチェックマークを付ける。

↑、↓ ボタンを押して録画データを選び、ENTER ボタンを押すと、オン/オフが切り替わります。

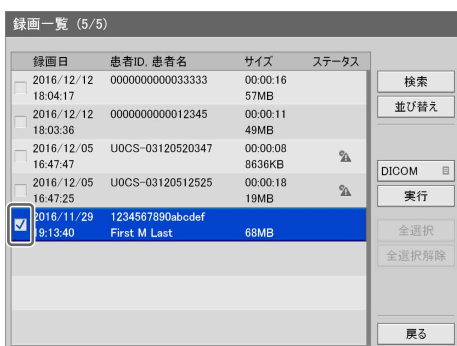

- 7 ↑、↓、←、→ ボタンを押して [実行] を選び、ENTER ボタンを押す。

静止画データのコピーが開始されます。

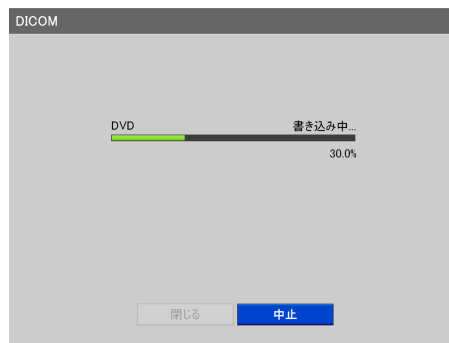

データのコピーが完了すると、次の画面が表示されます。

- 8 ENTER ボタンを押す。




「録画一覧」画面に戻ります。

外部メディアへの記録を中止するには


外部メディアへの記録を途中で中止するには、以下の操作を行います。

- 1 記録中に、ENTER ボタンを押す。

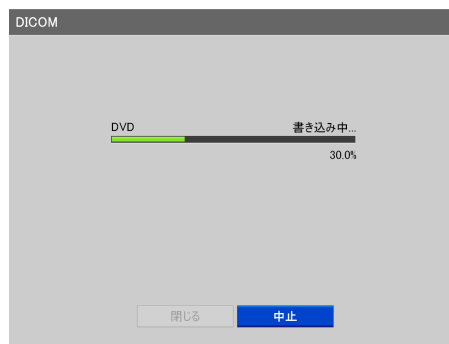

画面上に、記録中止の確認メッセージが表示されます。フロントパネルディスプレイには、「CANCEL YES/NO」のメッセージが表示されます。

- 2** 画面上の [はい]、またはフロントパネルディスプレイの [YES] を選び、ENTER ボタンを押す。

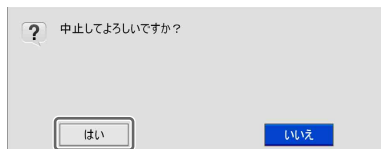

外部メディアへの記録が中止されます。